



## Eine kurze Information für Praxisteams

### Die HarmonieSchiene<sup>®</sup> von Orthos – unsichtbare Zahnschiene



Speziell für Zahnarztpraxen hat das Fachlabor Orthos die transparenten HarmonieSchienen entwickelt. Orthos hat seit 1983 Erfahrung in der Fertigung kieferorthopädischer Geräte. Hergestellt werden die Schienen an den zwei Laborstandorten Frankfurt am Main/Nieder-Eschbach und Weimar in Thüringen. Das seit 2004 erprobte und kontinuierlich weiterentwickelte Schienen-System ist geeignet für die Korrektur von kleinen bis mittleren Fehlstellungen der Zähne. Eine spezielle Software oder Zertifizierung für Behandler\*innen ist nicht erforderlich – er/sie kann direkt starten!

#### So wirkt die Korrekturschiene

Die durchsichtige, flexible Korrekturschiene ist ein Aligner aus speziellem Kunststoff. **BioForcePro<sup>®</sup>** - das exklusive Schienenmaterial der HarmonieSchiene sorgt für eine konstant gleichbleibende Kraftübertragung auf die Zähne während der gesamten Tragezeit. Das Material enthält keine Weichmacher, ist also frei von Bisphenol A (BPA). Wichtig für Allergiker. Die feinen, leichten Schienen bieten optimalen Tragekomfort.

#### Das benötigen wir von Ihnen

Sie schicken uns exakte permanente Abformungen, Klasse-3-Hartgipsmodelle oder Intraoral-Scan der Patient\*innen. Nach Vermessung der Modelle setzen wir uns telefonisch mit Ihnen in Verbindung und besprechen das Behandlungsziel, die Machbarkeit oder eventuelle Alternativen. Daraufhin erstellen wir ein kostenfreies, unverbindliches **„AFISL - Angebot für Ihr schönstes Lächeln“** für Ihre Patient\*innen, in dem der passende Paketpreis und das genaue Vorgehen beschrieben werden. Darin ist das geplante Ergebnis über einen QR-Code als 3D-Animation zu sehen. Der Plan dient als Gesprächsunterlage für Sie. Ihre Patient\*innen entscheiden sich danach in aller Ruhe.

#### Dann kann es losgehen

Sobald der Herstellungsauftrag bei uns eingegangen ist, wird die benötigte Anzahl von Schienen vom Labor gefertigt. Die Schienen übertragen Schritt für Schritt das gewünschte Ergebnis auf die Zähne. Attachments, die mit eingeplant werden, verstärken die Wirkung. Sie erhalten dann den durchnummerierten Satz an HarmonieSchienen und bestellen die Patient\*innen zu jedem Schienenwechsel ein. Falls ASR (Approximale Schmelzreduktion) erforderlich sein sollte, um Platz für die Bewegung der Zähne zu schaffen, bekommen Sie von uns einen ausführlichen Beschleifplan.

## So lange dauert die Behandlung

Die Schienen werden alle 2 Wochen gewechselt. Außer zum Essen und zur Zahnpflege muss die HarmonieSchiene von Orthos rund um die Uhr getragen werden. Wie aufwändig die Behandlung ist und wie lange sie dauert, hängt von der individuellen Fehlstellung ab. Wichtig ist, dass Sie den korrekten Verlauf der Zahnkorrektur kontinuierlich bei Kontrollterminen überprüfen.

## Sehr wichtig, um das Behandlungsergebnis zu erhalten

Um das Behandlungsergebnis dauerhaft zu sichern, gibt es zwei Möglichkeiten: das Tragen von herausnehmbaren Retainerschienen oder einen festen Klebe-Retainer. Hierfür haben wir unseren **RotkäppchenRetainer®** entwickelt, der von uns im Labor bereits auf dem Modell angepasst wird und mithilfe der kleinen Käppchen besonders einfach anzubringen ist. Unser Labor empfiehlt im Behandlungsplan bereits die für den Fall passende Retentionsmaßnahme.

> **Auf Wunsch begleiten unsere Dentalreferent\*innen Ihren 1. Fall vor Ort!**

> **Für Fragen erreichen Sie unser Service-Center: +49(0)69 – 71 91 00 – 47 oder buchen Sie **kostenfrei einen Termin zur Erstberatung** (Telefon od. Video-Call)!**

> **Nutzen Sie gerne unseren **Live-Chat per WhatsApp**: +49(0) 151 2233 7253:**

- Senden Sie uns per WhatsApp Bilder von der Zahnsituation Ihrer Patient\*innen und nennen Sie dabei bitte **unbedingt Ihren Praxisnamen!** (Patient\*innen-Namen nicht nennen: Datenschutz!)
- Wir nehmen **eine erste Einschätzung** vor, ob der Fall mit der HarmonieSchiene behandelt werden kann. Bitte beachten Sie: Dieser Service für Zahnarztpraxen während der Laborzeiten **ersetzt keine Diagnostik anhand von Modellen!**



### **ORTHOS Fachlabor für Kieferorthopädie GmbH & Co. KG**

Berner Straße 23  
60437 Frankfurt/Nieder-Eschbach  
Tel. 069 – 71 91 00 0  
info@orthos.de / info@harmonieschiene.de

Über der Nonnenwiese 7  
99428 Weimar  
Tel. 03643 – 80 80 0  
weimar@orthos.de



### **ORTHOS AG**

Rathausstrasse 14  
CH-6341 Baar  
Tel. +41(0)41-500 64 88  
info@orthos-ag.ch



### **ORTHOS Austria GmbH**

Am Rosendorn 17A  
A-2345 Brunn am Gebirge  
Tel. +43(0)2236-38 42 32  
info@orthos-autria.at

**[www.harmonieschiene.de/.ch/.at](http://www.harmonieschiene.de/.ch/.at)**

**[www.schlafharmonie.de](http://www.schlafharmonie.de)**

**[www.orthos.de](http://www.orthos.de)**